




Brugervejledning

BOB-korset

■ Dato for udlevering: _____

Sahva
Et liv i bevægelse

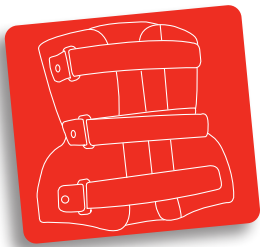

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om dit nye korset, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af korsettet.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Korsettet skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Dit korset er et hjælpemiddel, der har til formål at aflaste ryggen for uheldsmæssige belastninger. Det er derfor vigtigt, at du strammer korsettet godt til, da aflastningen bl.a. sker ved at øge trykket i bughulen.

› Indikation

Bruges til immobilisering af rygskelettet. Kan anvendes præ- og postoperativt. Anvendes ofte en periode for at vurdere, om en evt. stivgørende

operation vil være effektiv. Kan anvendes til behandling af kroniske eller tilfældige lænderyg-smertter, osteoporose, spondylolistese, frakturer og spinal stenose.

› Materialer

Dit korset er lavet af et termoplastisk materiale; ofte med lufthuller i. Korsettet åbnes foran, og spændes med tre – fem velcrostropper.

› Behandlingstid for midlertidige hjælpemidler

Efter lægens anvisninger.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

› Påtagning

Korsettet kan tages på enten stående eller liggende. Start med at spænde det midterste velcrobånd, hvorefter de andre spændes. Det kan være nødvendigt at efterspænde alle velcrostropper.

› Aftagning

Korsettet kan tages af enten stående eller liggende. Start igen med at løsne det midterste velcrobånd, hvorefter de andre løsnes langsomt.


› Pleje af huden

Huden skal vaskes dagligt, da du sveder mere med korset end uden. Brug altid en undertrøje eller T-shirt under korsettet. Ved brug af creme på kroppen, er det vigtigt, at cremen er trængt helt ind i huden, inden korsettet tages på.

› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen.

Alt sammen kan være med til at ændre korsettets pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

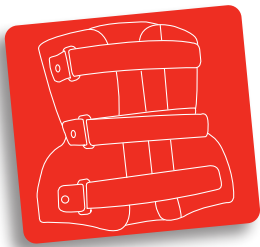

› Særlige risici

Der vil opstå røde mærker (trykmærker) fra korsettet. Hvis disse ikke forsvinder cirka tyve minutter efter, du har taget korsettet af, skal du kontakte din bandagist.

› Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

› Rengøring

Korsettet skal vaskes med vand og en allergivenlig sæbe. Skyl grundigt for at undgå sæberester, der kan irritere huden.

› Bortskaffelse/returnering

Når korsettet ikke længere passer eller er slidt op, kan det afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

› Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.