




Brugervejledning

Boston korset

■ Dato for udlevering: _____

Sahva
Et liv i bevægelse

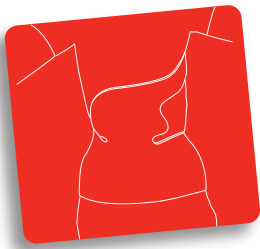

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om dit nye korset, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af korsettet.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt igennem.

Korsettet skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

At forsøge at standse progressionen i scoliosen og hyperkyfosen, men kurven kan ikke forventes mindsket. Bruges 23 timer i døgnet.

› Indikation

Idiopatisk Scoliose (S-eller C-formet krumning af rygsøjlen) – 'Idiopatisk' betyder 'af ukendt årsag'. Mb. Scheuermann (Scheuermann's sygdom = kyfosedeformitet / "rundryggethed" med kiledannelse

større end 5 grader på mindst tre ryghvirvler, eller sværere kileform på en eller to ryghvirvler).

› Materialer

Korsettet er opbygget i termoplastisk materiale, som er foret med en blød polstring indvendigt.

› Behandlingstid for midlertidige produkter

Cirka to år efter første menstruation påbegyndes udtrækning af korsettet efter lægens anvisning.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

› Påtagning


Træk i undertrøjen og sørg for, at der ikke er folder. Tag korsettet på. (Åbning bagpå). Kontroller at korsettet sidder lige, og kommer på plads såvel i taljen som over hofterne. Stram den midterste gjord ind til stregen. Stram derefter den nederste og derefter den øverste gjord. Efterspænd eventuelt den midterste gjord. Pas på at undertrøjen ikke rynker under korsettet, og at overskydende stof trækkes ud gennem åbningen bagpå korsettet. Kontroller herefter, at korsettet er strammet rigtigt til. Korsettets to kanter skal være parallelle.

› Aftagning

Løs alle stropperne. Tag fat bag i åbningen med hver hånd og åben korsettet. Træk derefter korsettet af.

› Pleje af huden

Bad dagligt (brusebad eller karbad). Bær altid en bomuldstrøje uden søm nærmest på kroppen. Skift hyppigt undertøj. Anvend altid trusser uden på korsettet. Brug ikke pudder under korsettet. Ved brug af creme på kroppen, sørg for at den er trængt helt ind i huden, før korsettet tages på. Hvis der skulle opstå problemer med huden, kontakt da sygehuset. Bemærk: Der, hvor korsettet sidder fast, det vil sige i taljen og over hofterne, bliver huden ofte lidt mørkere og lillafarvet. Dette giver sædvanligvis ikke problemer. Misfarvningen forsvinder gradvist, når

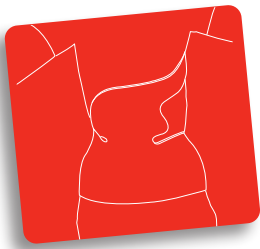

korsetbehandlingen er afsluttet.

› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre korsettets pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

› Særlige risici

Trykmærker, der ikke forsvinder tyve minutter efter korsettet er taget af, er tegn på for højt tryk og kan udvikle sig til tryksår.

› Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

› Pleje af korsettet

Korsettet skal rengøres dagligt både ind- og udvendigt. Du kan vaske det med almindelig sæbeopløsning. Skyl grundigt for at undgå sæberester, der kan irritere huden. Tør bagefter med frottéhåndklæde eller viskestykke. Hvis skumgummien har suget vand op, pres da dette ud. Lad ikke korsettet tørre ved et varmeelement eller i solen, da korsettet så kan blive blødt og ændre form.

› Bortskaffelse/returnering

Når korsettet ikke længere passer eller er slidt op, kan det afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

› Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.