



THUASNE

MOBIDERM

Aktiverer og stimulerer
lymfødemet i løbet af natten



NYHED

Kompressions-
shorts og BH
s. 4-7

Kompressionsteknik der reducerer lymfødem

Hvis du har dårlig blodcirkulation i ben, arme eller andre steder, er der risiko for både blodpropper og lymfødemer.

Lymfødem er en kronisk lidelse, der opstår, fordi funktionen i lymfesystemet er nedsat. Lymfødem viser sig som en vedvarende hævelse af især arme og/eller ben, men kan også være andre steder på kroppen; for eksempel omkring brystet i forbindelse med brystkræftoperation.

Lymfødembehandling består af to faser: Den initiale fase, som stræber efter at reducere lymfødemet så meget som muligt, og vedligeholdelsesfasen, som har til formål at bibeholde resultatet ved hjælp af medicinske kompressionsstrømper*.

Mobiderm er et unik og patenteret materiale, som effektivt vedligeholder et reduceret lymfødem.

Mobiderm består af et patenteret system med integrerede vatterede kuber, som aktiverer lymfesystemet, stimulerer lymfens gennembløb og modvirker fibrose. Mobiderm fås i flere forskellige udformninger. Dels på rulle og plade for applicering i kombination med bandagering under den initiale fase og dels som arm- og benstrømper, BH og shorts i en kombination af standard og specialsnyede modeller til anvendelse i vedligeholdelsesfasen.


**Mobiderm er medtaget i flere kliniske studier. Studier der viser, at begge faser bliver mere effektive og giver bedre resultat i kombination med anvendelse af Mobiderm om natten. POLIT study (2014), Marilyn study (2017), Mobinight study (2017).*



Mobiderm – gennemtestet og nem at anvende

- Mobiderm er et gennemprøvet og klinisk testet materiale, som giver et hurtigt og vedvarende resultat.
- Mobiderm blødgør fibrøst væv, samt stimulerer og aktiverer lymfesystemet.
- Mobiderm er enkelt at håndtere og meget behageligt at anvende.
- Mobiderm aktiverer og stimulerer lymfens gennembløb om natten hos dig der har lymfødeme, uanset stadie.
- Mobiderm er et supplement til medicinske kompressionsstrømper.
- Mobiderm anvendes under den initiale reduktionsfase og i vedligeholdelsesfasen.


Kliniske studier

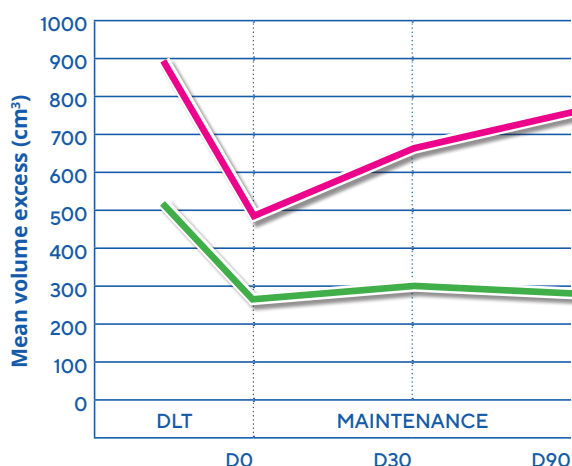

Mobiderm er anvendt i flere kliniske studier. I MARILYN-studiet* blev det tydeligt vist, at lymfødeme mindskede i volumen, fra den initiale reduktionsfase blev stabiliseret, og reduktionen blev opretholdt ved brug af Mobiderm om natten. Uden Mobiderm øgede volumen allerede fra dag 1 i vedligeholdelsesfasen.



På YouTube findes flere videoer omkring opbygningen og anvendelsen af Mobiderms produkter – søg på Thusane Scandinavia

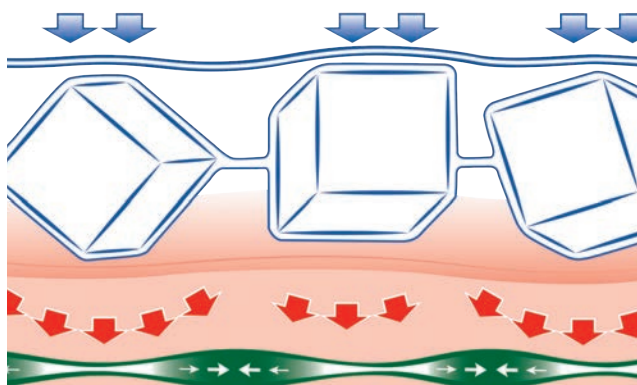

Den varierende konstruktion af materialet stimulerer flowet i lymfesystemet.



Store kuber 15x15 mm



Små kuber 5x5 mm

Indhold

Kompressionsteknik	2
Mobiderm Intimate Shorts	4
Mobiderm Intimate BH	6
Mobiderm Autofit	8
Størelsetabeller og produktoversigt	10

* 2017, An auto-adjustable night garment to control early rebound effect of edema volume after intensive phase of Decongestive Lymphedema Therapy (DLT). Mestre S.^{1,2}, MD, MSc, Gaillard G.¹, MD, Benhamou M.¹, MD, Soulier-Sotto V.¹, MD, Nou M.¹, MD, Pasqualini M.², PhD, Ben Amor C.³, MD, Quere I.^{1,2,4}, MD, PhD.

MOBIDERM INTIMATE SHORTS

Mobiliserer og aktiverer lymfødeme i genitalområdet.

Med Mobiderm Intimate Shorts tilbyder vi et specifikt udviklet produkt til dig med hævelse i lyskeområdet – hvilket bl.a. kan opstå efter endt kræftbehandling.

Mobiderm Intimate Shorts er udviklet sammen med sundhedspersonale og brugerne for at imødekomme alle tænkelige krav og ønsker. Resultatet er et produkt med en løs/udtagelig pelotte med Mobidermstrukturer i et diskret design.

Kompressionen i materialet er vel gennemtænkt med et graderet tryk, der modsvarer 15-20 mmHg rundt om bækkenområdet, hvor pelotten også er placeret. Ved benafslutningen er kompressionen kun ca. 5 mmHg, hvilket gør at shortsene med fordel kan kombineres med overlappende medicinske kompressionsstrømper (lår/lyske strømper). Da det er funktionen fra Mobidermstrukturen som aktiverer lymfetransporten er kompressionsgraden fuldt tilstrækkelig for at opnå en effekt.

Mobiderm Intimate Shorts har pelotter med Mobidermstruktur som kan tages ud og vaskes separat. Disse pelotter er forskellige i udformningen alt efter om det er til kvinder eller mænd, for at sikre en god pasform og effekt.

Sammen med tre behandlingscentre i Frankrig har vi også gennemført et medicinsk studie med Mobiderm Intimate Shorts. Studiet viser ekstremt positive resultater og blev præsenteret i 2022 ved 46th European Society of Lymphology Congress.

- **Færdig løsning** til kvinder og mænd med ødem i genitalområdet.
- **Kan kombineres med lår/lyskestrømper** ved behov for behandling af hele benet.
- **Specielt udformede pelotter** med Mobidermstruktur med forskelligt design til mænd og kvinder.
- **Anvendes dag og nat** afhængig af behov.
- **Den patenterede struktur** stimulerer og aktiverer lymfesystemet.

Art nr. 373601

Mobiderm Intimate Shorts til kvinder

Art nr. 373701

Mobiderm Intimate Shorts til mænd

Materialesammensætning:

Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum.
Se detaljeret information på vaskemærket.

Vaskes i maskine ved maksimalt 40 grader.
Holdbarhed på 6 måneder.



På YouTube findes flere film om Mobiderm Intimate Shorts.

Mobiderm Intimate Shorts

	Omfangsmål	
	cG	cK
1	45 - 54	88 - 94
2	48 - 58	95 - 101
3	51 - 62	102 - 108
4	54 - 66	109 - 115
5	57 - 69	116 - 122
6	60 - 72	123 - 129

Alle størrelser findes i både herre- og damevarianten.



Mobiderm Intimate Shorts til kvinder



Mobiderm Intimate Shorts til mænd



MOBIDERM

THUASNE

MOBIDERM INTIMATE BH

Kompressions-BH som mobiliserer og aktiverer postoperative og kroniske ødemer i brystområdet. Mobiderm Intimate BH er en optimal løsning til kvinder som har brystrelateret ødem.

2-3 ud af 10 kvinder risikerer at udvikle lymfødem som følge af strålebehandlingen eller kirurgiske indgreb i forbindelse med brystkræft. Uanset om det vedrører total mastektomi eller deloperation kan ødem opstå akut post-operativt eller udvikler sig langt senere som kronisk lymfødem i brystet og/eller brystområdet. Studier viser at mere end 1,5 millioner patienter over hele verden er ramt af brystkræftrelaterede ødemer.

Mobiderm Intimate BH er en kompressions-BH som er specielt udviklet til brug, i den akutte fase efter behandling af brystkræft samt ved vedvarende og kronisk lymfødem.

Mobiderm Intimate BH har en effektivt kompressiv funktion som sammen med den integrerede pelotte med Mobidermstruktur drænerer og bearbejder ødemet, samt minimerer risikoen for udvikling af hæmatomer (blodansamlinger).

Mobiderm Intimate BH er gennemtænk og udformet med bredde og bløde skulderstropper, højt skåret under armene samt med integrerede sømme som ikke generer. De to medfølgende pelotter med Mobidermstruktur kan tages ud og vaskes separat.

- **Unikt produkt til kvinder** med ødemproblematik i brystområdet.
- **Integrerede lommer** til eksterne brystproteser.
- **Udtagelige pelotter** med **Mobidermstruktur**.
- **Perfekt afvejet kompression** i kombination med Mobidermstrukturen mobiliserer og aktiverer ødemet.
- **Bredde polstrede** skulderstropper sikrer optimalt lymfeflow og funktion.
- **Flade og bløde** sømme som ikke generer og giver øget komfort ved langvarigt brug.
- **Lynlås på forsiden** gør Mobiderm Intimate BH let at tage af og på.

Art nr. T571301

Mobiderm Intimate BH

Materialesammensætning:

Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum.
Se detaljeret information på vaskemærket.

Vaskes i maskinen ved maksimalt 30 grader.
Holdbarhed på 6 måneder.

Mobiderm Intimate BH

	Skålstørrelse		
X-Small (str. 70-75)	AA/A	B/C	D/E
Small (str. 80-85)	AA/A	B/C	D/E
Medium (str. 90-95)	AA/A	B/C	D/E
Large (str. 100-105)	AA/A	B/C	D/E
X-Large (str. 110-115)	AA/A	B/C	D/E



Mobiderm Intimate BH
set forfra



Mobiderm Intimate BH
set bagfra



THUASNE

MOBIDERM autofit


Mobiderm Autofit har justerbar pasform i standard størrelser, hvilket indebærer, at den passer perfekt i den initiale reduktionsfase.

Takket være muligheden for at justere omfanget kan Mobiderm Autofit følge lymfødemets udvikling, når det mindsker i omfang. Dette gør, at Mobiderm Autofit med fordel kan anvendes i den initiale reduktionsfase som alternativ til eller i kombination med bandagering. De patenterede bløde kuber aktiverer lymfesystemet og modvirker risikoen for, at stillestående lymfe kan forårsage fibrose.


Markeringer på materialet muliggør individuel tilpasning af kompressionsniveauet i tre trin (+++) Disse kan til og med anvendes til at kontrollere ødemets variation over tid.

Mobiderm Autofit kan med fordel anvendes i vedligeholdelsesfasen, idet den i mange tilfælde kan erstatte behovet for specialfremstillede produkter. Den justerbare mulighed bevirker også, at niveauet på den aftagende kompression kan reguleres efter behov.

Tal med din Sahva-behandler om hvad der passer til dig.

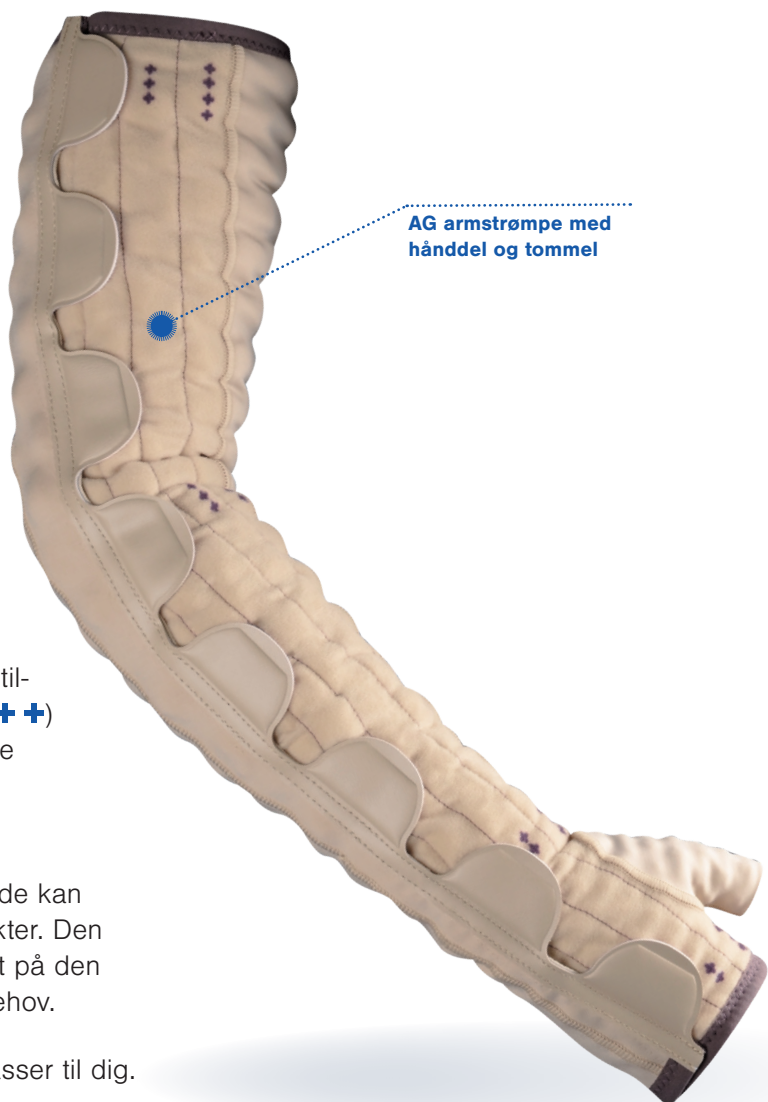

Størrelse					Længde ℓ	
	Omfang ved cA	Omfang ved cC	Omfang ved cD	Omfang ved cG	Normal ℓ = 40 - 45 cm	Lang ℓ = 45 - 50 cm
AG Armstrømpe – højre					Artikelnr.	
1	17 - 21	15 - 19	22 - 28	25 - 32	37330220100261	37330220100271
2	17 - 21	16 - 20	24 - 30	29 - 36	37330220200261	37330220200271
3	18 - 22	17 - 21	26 - 32	33 - 40	37330220300261	37330220300271
4	18 - 22	17 - 21	28 - 34	37 - 44	37330220400261	37330220400271
5	19 - 23	18 - 22	30 - 36	41 - 48	37330220500261	37330220500271
6	20 - 24	19 - 23	31 - 37	45 - 52	37330220600261	37330220600271
AG Armstrømpe – venstre					Artikelnr.	
1	17 - 21	15 - 19	22 - 28	25 - 32	37330220100262	37330220100272
2	17 - 21	16 - 20	24 - 30	29 - 36	37330220200262	37330220200272
3	18 - 22	17 - 21	26 - 32	33 - 40	37330220300262	37330220300272
4	18 - 22	17 - 21	28 - 34	37 - 44	37330220400262	37330220400272
5	19 - 23	18 - 22	30 - 36	41 - 48	37330220500262	37330220500272
6	20 - 24	19 - 23	31 - 37	45 - 52	37330220600262	37330220600272

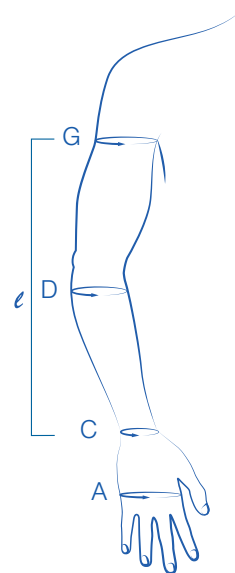

Standard



Markerede niveauer:
Kompressionen kan justeres helt efter dit behov i takt med, at ødemet mindsker i omfang.

Antiglid-knopper:
Forhindrer faldskader, når du går oppe.




Integreret hånddel:
Modvirker ødem i hånden. Kan ved behov åbnes, og hånden frigøres.

Åbent design:
Letter på- og aftagning



Velcrolukning:
Dobbelte rækker på knæ- og lårstrømperne for hurtig og enkel på- og aftagning.

Velcrolukning:
Kun én række på armstrømperne for enkel på- og aftagning med én hånd.

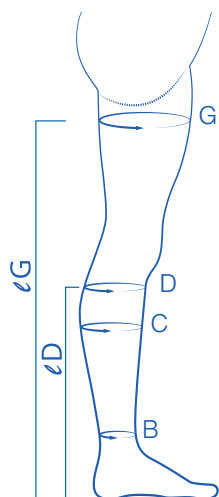


Størrelse	Omfang			Længde l			
	ved cB	ved cC	ved cD	Kort lD : 38 - 40 cm	Normal lD : 40 - 42 cm	Lang lD : 42 - 44 cm	Ekstra lang lD : 44 - 46 cm
AD Knæstrømpe							
Artikelnr.							
1	16-24	24-35	25-36	37340120100231	37340120100232	37340120100233	37340120100234
2	20-28	32-43	32-43	37340120200231	37340120200232	37340120200233	37340120200234
3	24-32	40-51	39-50	37340120300231	37340120300232	37340120300233	37340120300234
4	28-36	48-59	46-57	37340120400231	37340120400232	37340120400233	37340120400234

Størrelse	Omfang			Længde l			
	ved cB	ved cC	ved cG	Kort lG : 67 - 72 cm	Normal lG : 72 - 77 cm	Lang lG : 77 - 82 cm	Ekstra lang lG : 82 - 87 cm
AG Lårstrømpe							
Artikelnr.							
1	16-24	24-35	46-57	37350120100231	37350120100232	37350120100233	37350120100234
2	20-28	32-43	53-65	37350120200231	37350120200232	37350120200233	37350120200234
3	24-32	40-51	61-72	37350120300231	37350120300232	37350120300233	37350120300234
4	28-36	48-59	68-80	37350120400231	37350120400232	37350120400233	37350120400234


Mobiderms størrelsetabeller og produktoversigt

Mobiderm kan anvendes dag og nat (efter behov), og har en effektiv væske-drivende funktion. Foruden et stort antal standardstørrelser er der yderligere mulighed for at specialfremstille Mobiderm nøjagtig efter dine individuelle mål.


Studier viser, at udelukkende brug af medicinske kompressionsstrømper om dagen ofte ikke er tilstrækkeligt for at kontrollere et lymfødeme og vedligeholde resultatet fra den initiale reduktionsfase. Ved at aktivere det lymfatiske væv yderligere om natten med Mobiderm, stimuleres lymfekredsløbet, og risikoen for, at lymfødemet øger i omfang, modvirkes effektivt. Det er klinisk bevist!

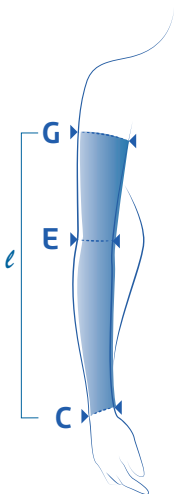

Størrelse	Omfang ved cC	Omfang ved cE	Omfang ved cG	Længde l	
				Normal l = 40 - 45 cm	Lang l = 45 - 50 cm
Artikelnr.					
1	14 - 16	22 - 25	25 - 29	37300220100233	37300220100232
1+	14 - 16	24 - 27	28 - 32	37300240100233	37300240100232
2	16 - 18	25 - 28	29 - 33	37300220200233	37300220200232
2+	16 - 18	27 - 30	31 - 35	37300240200233	37300240200232
3	18 - 20	28 - 31	32 - 36	37300220300233	37300220300232
3+	18 - 20	30 - 33	35 - 39	37300240300233	37300240300232
4	20 - 22	31 - 34	35 - 39	37300220400233	37300220400232
4+	20 - 22	33 - 36	38 - 42	37300240400233	37300240400232
5	22 - 24	34 - 37	38 - 42	37300220500233	37300220500232
5+	22 - 24	36 - 39	41 - 45	37300240600233	37300240500232

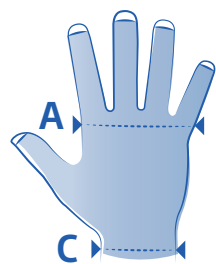

Størrelse	Omfang ved cC	Omfang ved cA	højre / venstre hånd	
			højre hånd	venstre hånd
Artikelnr.				
1	14 - 16	15 - 17	37320120100201	37320120100202
2	16 - 18	17 - 19	37320120200201	37320120200202
3	17 - 19	19 - 21	37320120300201	37320120300202
4	19 - 21	21 - 23	37320120400201	37320120400202
5	20 - 22	23 - 25	37320120500201	37320120500202
6	21 - 23	25 - 27	37320120600201	37320120600202

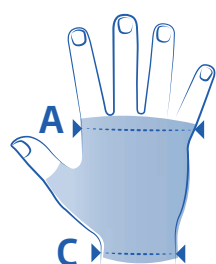

Størrelse	Omfang ved cC	Omfang ved cA	højre / venstre hånd
			Artikelnr.
1	14 - 16	15 - 17	37310120100299
2	16 - 18	17 - 19	37310120200299
3	17 - 19	19 - 21	37310120300299
4	19 - 21	21 - 23	37310120400299
5	20 - 22	23 - 25	37310120500299
6	21 - 23	25 - 27	37310120600299

Mobiderm standardstørrelser



AC1 handske



AC1 handske uden fingre



CG armstrømpe



Intimate BH



Intimate Shorts

Mobiderm efter individuelle mål



CG armstrømpe



AG armstrømpe med hånddel uden tommel



AG armstrømpe med hånddel med tommel




AD knæstrømpe



AG lårstrømpe

Mobiderm – øvrigt sortiment

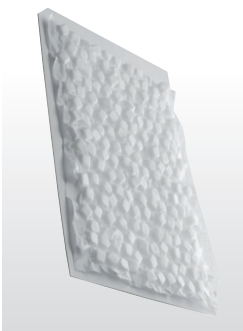

Plade



Rulle

Mobiderm på rulle og plader

Det unikke Mobiderm materiale fås yderligere i plader eller ruller for anvendelse sammen med bandagering i den initiale bandageringsfase. Kan klippes til efter behov.

Plade	25x25 cm	Små kuber: 5x5 mm
Plade	25x100 cm	Små kuber: 5x5 mm
Plade	25x100 cm	Store kuber: 15x15 mm
Rulle	10x300 cm	Små kuber: 5x5 mm
Rulle	10x300 cm	Store kuber: 15x15 mm



THUASNE

MOBIDERM

Aktiverer og stimulerer
lymfødemet i løbet af natten

Sahva er en sundhedsvirksomhed med fagligt dygtige specialister i kroppens bevægelighed. Sahva har mere end 35 klinikker fordelt over hele landet, og vi hjælper dig til et liv i bevægelse med hjælpemidler af højeste kvalitet og til dit behov.

Vi er Danmarks største udbyder af kropsbårne hjælpemidler og har mere end 150 års erfaring. Vi vejleder og deler vores viden med professionelle og kunder gennem et stort udbud af aktiviteter.

Følg os på:



Sahva
Et liv i bevægelse

Sahva A/S
Nykær 68
2605 Brøndby

Tlf. 7011 0711
sahva.dk